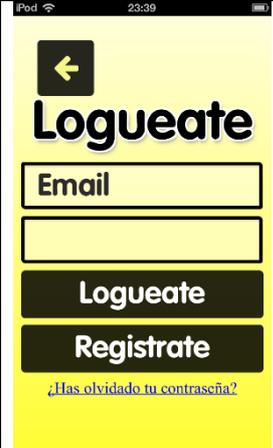


TUTORIAL ABLAH

Ablah es un comunicador personal que puedes usar para mandos primarios, esto es, una imagen para una petición, para generar frases, combinando diferentes imágenes en una secuencia, o para crear una agenda.

Ablah es totalmente personalizable y cada usuario puede incluir sus propias imágenes y sonidos y organizarlas en galerías o frases según sus necesidades.

La primera vez que uses Ablah, es necesario una conexión a internet para crear tu usuario y contraseña y así poder hacer copia de seguridad de tus galerías en nuestra base de datos de Miranos. De esta forma, podrás acceder a tu perfil desde cualquier otro dispositivo en el que esté instalado Ablah.

	<p>PANTALLA DE ACCESO.</p> <p>En esta pantalla debes introducir tu usuario y contraseña para acceder al programa. La primera vez es imprescindible una conexión a Internet para registrar tu usuario en la base de datos de Miranos y así poder comenzar a guardar tus copias de seguridad. De este modo, podrás acceder a tu perfil y galerías desde cualquier otro dispositivo que tenga Ablah.</p> <p>Si es tu primer acceso, pulsa en el botón de registrarse y completa el formulario.</p>
	<p>PANTALLA DE REGISTRO.</p> <p>Escribe la información requerida y aguarda unos instantes hasta que recibas el mensaje para confirmar tu registro vía email. Cada usuario se asocia a una cuenta de correo electrónico y cualquier petición para recuperar la contraseña se hará por medio de tu email.</p>
	<p>PANTALLA INICIAL.</p> <p>Pulsando sobre el botón redondo central, accedemos a la pantalla para generar frases.</p> <p>Abajo y de izquierda a derecha tienes los siguientes botones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Usuario, para loguearte o cambiar de usuario.• Información, página web y correos de soporte.• Ayuda, este tutorial que estás leyendo.• Idioma, panel para cambiar de idioma. En el futuro se añadirán más idiomas a elegir.




PANTALLA DE FRASES.

En la parte superior, están las galerías suministradas por el programa o creadas por nosotros. Al seleccionar una de ellas, se mostrarán las imágenes de esa galería en la parte inferior. Al seleccionar una imagen, el programa la añade a la fila inferior para ir componiendo una frase. Con los botones de + y – podemos añadir una galería completa o borrar completamente la frase que estamos componiendo.

En los botones inferiores tenemos arriba a la izquierda “frases” que sirve para intercambiar en la primera línea superior entre las galerías y las frases. Debajo está el botón para volver atrás. Arriba a la derecha tenemos el botón para eliminar las imágenes de una frase una a una empezando siempre por la última que se ha añadido. Debajo está el botón para guardar una frase. En el centro y con forma circular, está el botón para reproducir la frase que hemos hecho.

Al pulsar sobre el botón para reproducir frases, nos llevará a una nueva pantalla para que veamos el pase de diapositivas de nuestra frase.

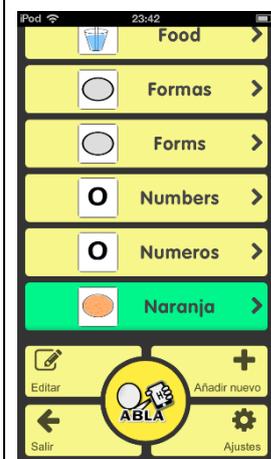

PANTALLA DE EDICIÓN Y AJUSTES.

Nos muestra las galerías que incluye el programa o hemos creado nosotros mismos. A continuación de la última galería nos muestra las frases que hemos guardado. Las galerías se mostrarán sobre fondo amarillo y las frases sobre fondo verde para poder distinguir unas de otras.

Debajo tenemos un menú con las siguientes opciones:

- Editar, nos permite modificar o eliminar las frases o galerías. Puede requerir contraseña o no según nuestra configuración. Por defecto el programa está configurado para que sí la pida y es la misma que tenemos como usuario.
- Añadir nuevo, nos permite crear una nueva galería.
- Salir, nos lleva a la pantalla anterior.
- Ajustes, nos permite configurar las opciones del programa.

	<p>A la izquierda podemos ver la pantalla en modo edición para eliminar o borrar galerías o frases. A la derecha tenemos la pantalla para crear o editar una galería.</p> <p>Podemos seleccionar la imagen de nuestra librería o hacer una foto. También podemos rotar esta imagen. El sonido podemos grabarlo sobre la marcha o escoger un grabado previamente.</p>	
	<p>PANTALLA DE CONFIGURACIÓN.</p> <p>En esta pantalla podemos cambiar los ajustes de Ablah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contraseña, con la primera opción podemos desactivar la petición de clave para editar o eliminar las galerías. • A, oculta el texto durante la reproducción de una frase. • A, cambiar el color al texto de los nombres de imágenes. • Dibujo, permite cambiar el color de fondo durante un pase. • Reloj, configura el tiempo de espera entre una imagen y la siguiente. • MIRANOS, sincroniza nuestras galerías con la nube de MIRANOS. 	

Para más información, www.maizapps.com // www.ablah.org // info@ablah.org

Muchas gracias por su atención.